



REMEDIC

Wasserglas mit Pillendose

Die perfekte Kombination zur einfachen Verabreichung von Medikamenten



Füllen Sie das Wasserglas.

Bestücken Sie die Pillendose und setzen Sie diese auf das Glas.

Zur Zeit der Medikamenteneinnahme heben Sie die Pillendose vom Glas und öffnen sie.

- Das Wasserglas aus Borosilikat hat eine Mulde für den Daumen um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Die Maßangabe auf dem Glas erleichtert eine Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme.
- Die Pillendose ist leicht zu öffnen und kann dank eines Silikonrings sicher auf das Glas gesetzt werden.
- Der abgeflachte Deckel kann einfach mit einem Code oder Namensschild markiert werden und ein transparentes Sichtfenster ermöglicht den Blick in die Pillendose.

Reinigung und Pflege

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie das Wasserglas mit Pillendose mit heißem Wasser abspülen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, Azeton, Benzin oder aggressive Reinigungsmittel.
- Sie können das Glas in einer Spülmaschine waschen.
- Die Pillendose ist nicht spülmaschinenfest und wird mit warmem Wasser abgespült. Benutzen Sie bei Bedarf ein mildes Spülmittel.
- Lassen Sie das Glas und die Pillendose geöffnet trocken.

Entsorgung

- Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Hergestellt für: