




# REMEDIC

## GÖZ DAMLASI YARDIMCISI

Göz damlalarını kolayca damlatmak için uygulama yardımcısı

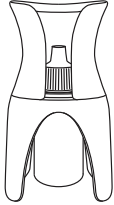

- Bu uygulama yardımcısı birçok standart göz damlası şişesiyle kullanılabilir.
- Bu göz damlası yardımcısını kullanırken yaralanmaları önlemek için uç kısmını gözden uzak tutun.
- Kirli ucun neden olacağı göz enfeksiyonlarından sakınılmalıdır.
- Uygulayıcının yumuşak kenarı gözü açık tutar ve damlalar güvenli bir şekilde göze damlar.
- Lütfen kullanmadan önce bu talimatları okuyun.


### Göz damlalarıyla ilgili notlar

- Göz damlaları yaklaşık olarak vücut sıcaklığına kadar ısıtılmalıdır.


- Göz damlaları sadece doktorunuza danıştıktan sonra kullanılmalıdır.
- Göz damlalarını kullanırken hijyene dikkat edin.
- Doğru kullanım ürüne göre farklılık gösterir. Kontak lenslerin çıkarılması gerekebilir ve çok fazla göz damlası damlatmak reaksiyonlara sebep olabilir. Lütfen doğru şekilde hazırlama için her zaman prospektüsü okuyun.
- Damlaları damlatmadan önce ellerinizi iyice yıkayıp kurutun.
- Göz damlası yardımcısını düzenli bir şekilde akan suyun altında, gerekirse biraz temizlik maddesi ekleyerek temizleyin.
- Göz damlası yardımcısını kuru-maya bırakın.

- Uygulayıcıyı temizlemek için asla alkol, aseton, benzin, güçlü deterjanlar vb. kullanmayın.

## Göz damlası şişesini uygulayıcının içine yerleştirin

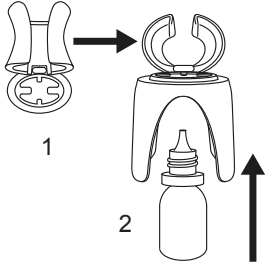


1. Uygulayıcıyı açın.
2. Göz damlası şişesinin kapağını açın ve şişeyi alt taraftan uygulayıcıya yerleştirin. Göz damlası şişesinin ve uygulayıcının sıkıca birbirine oturduğundan ve şişenin sallanmadığından emin olun.

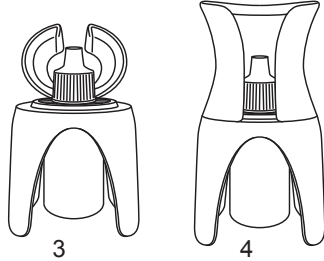


3. Göz damlası şişesini kapatın.
4. Uygulayıcıyı kapatın.

## Göz damlalarını uygulayın

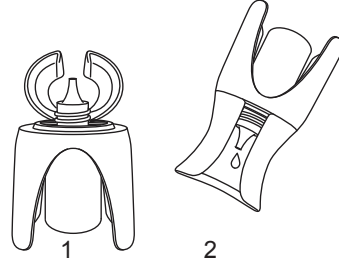

1. Uygulayıcıyı açın ve göz damlası şişesinin kapağını açın.
2. Uygulayıcıyı kapatın. Göz damlası yardımcısı şimdi kullanıma hazırdır.

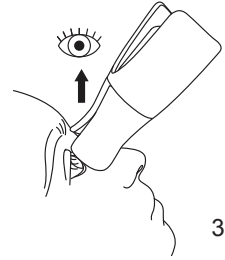

3. Göz damlası yardımcısını gözün üstüne yerleştirin ve başınızı mümkün olduğu kadar geriye doğru eğin. Gözünüzü açın ve mümkün olduğunca kırpmamaya çalışın. Gerekirse, göz damlası şişesine hafifçe bastırın.