

REMEDIC™

AFFORDABLE SOLUTIONS FOR HEALTHY
DAILY LIVING

MEDIKAMENTENDOSIERER


Tablettenbox für sieben Tage



1. Mit diesem Medikamentendosierer können Sie ihre Tabletten für sieben Tage im Voraus sortieren.
2. Jeder Tagesdosierer hat vier Fächer für die verschiedenen Tageszeiten.
3. Die gut lesbare und beständige Beschriftung erleichtert das korrekte Befüllen und Entnehmen.
4. Das ergonomische Design mit Griffrippe und -mulde sorgt für eine sichere Handhabung.
5. Die Tagesdosierer sind sicher und einhändig bedienbar.

Achtung: Bevor Sie ihre Tabletten in einem Medikamentendosierer aufteilen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt bestätigen, dass es zu keinen Wechselwirkungen oder Veränderungen Ihrer Medikamente kommen kann.

Bedienung

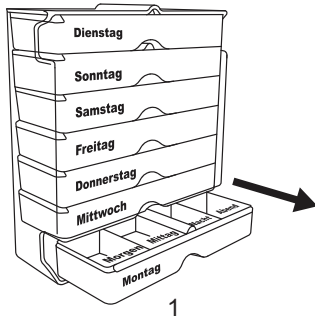

1. Ziehen Sie die Tagesbox aus dem Dosierer. Die restlichen Boxen rutschen nach unten und machen oben Platz für die gerade entnommene.
2. Schieben Sie den Deckel der Tagesbox in die Position, in der Sie entweder das Morgen-, Mittag-, Abend- oder Nacht-Fach öffnen. Entnehmen Sie ihre Pillen und schieben Sie den Deckel wieder zu.
3. Schieben Sie die aktuelle Tagesbox zurück in den Medikamentendosierer. Die Box befindet sich jetzt in oberster Position und es ist leicht ersehbar, welche Medikamente an diesem Tag schon eingenommen wurden, bzw. noch genommen werden müssen.

