



REMEDIC

Türstopper mit Teleskopgriff

Der Türstopper mit 90cm Teleskopgriff hält Türen mühelos, ohne dass Sie sich bücken müssen, auf und zu.

Er verhindert ein versehentliches Zuschlagen von Türen und kann zur Sicherheit auch von Innen platziert werden.



1. Klappen Sie den Stopper auf und ziehen Sie den Teleskopgriff zur gewünschten Länge aus.
2. Klemmen Sie den Stopper unter die Tür.
3. Der Stopper bleibt aufrecht stehen und kann mühelos, ohne Bücken, wieder entfernt werden.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, Azeton, Benzin oder aggressive Reinigungsmittel.
- Wischen Sie den Türstopper bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.

Entsorgung

- Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Hergestellt für: